



ICE Zirkon Keramik CE 0476

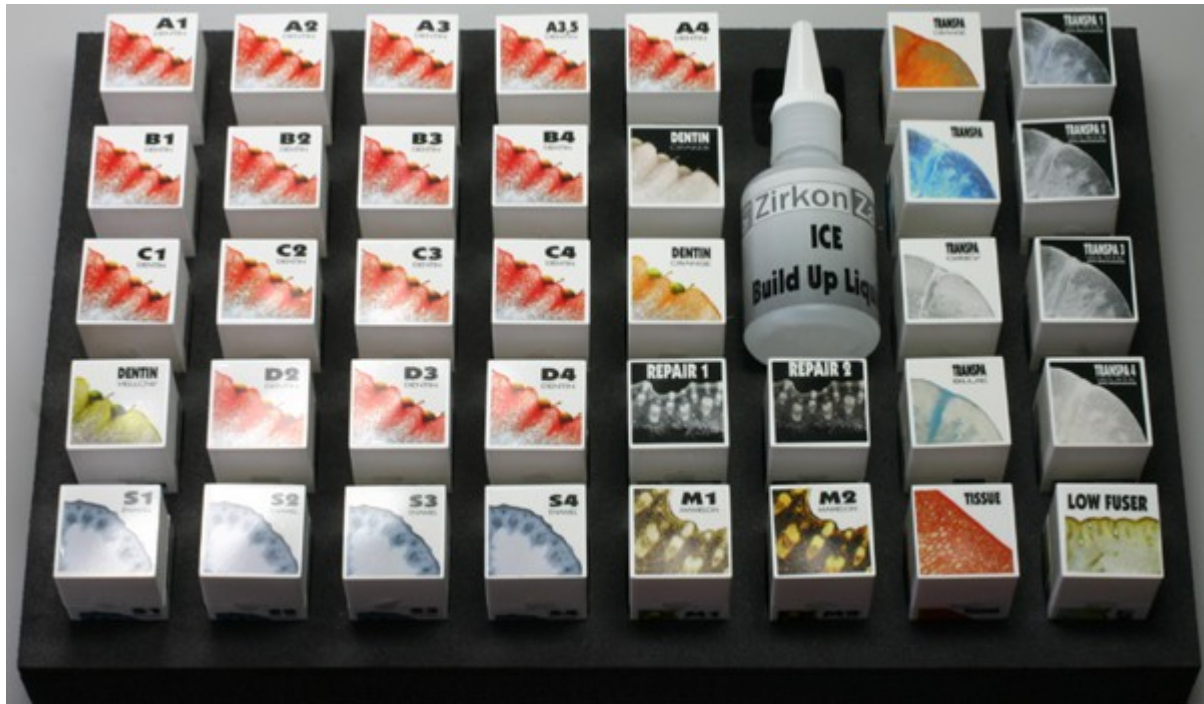

Brenntabelle der ICE Zirkon Keramik

Start Temperatur		400°
Trockenzeit		2 min
Vorwärmzeit		4 min
Steigetemperatur		55° / min
Endtemperatur	±10°	820°
Waschbrand (mit Dentin)		830°
Zweiter Brand u. Glasurbrand		0 – 15° weniger

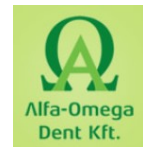

Haltezeit		± 1 min
Vakuum ein		400°
Vakuum aus	±10°	820°
Vakuumpegel		max
Abkühlung		1 min